



INSTRUÇÕES DE USO

DISPOSITIVO DE ANESTESIA JGM

ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este equipamento sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste equipamento, consulte a J.G. Moriya. Este equipamento somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

Atenção:

Para o total aproveitamento e conservação de seu Dispositivo de Anestesia, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. E qualquer dúvida contate a Assistência Técnica da J.G.Moriya.

Apresentação

Os Dispositivos de Anestesia J.G.Moriya foram concebidos e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia. Sendo o Dispositivo de anestesia adulto composto por: balão, conector para entrada de gases com tampa para fechamento (no caso da não utilização), válvula unidirecional e máscara de anestesia adulto; e o Dispositivo infantil composto por: balão, conector para entrada de gases com tampa para fechamento (no caso da não utilização), traquéia corrugada, válvula unidirecional e máscara de anestesia infantil.

Descrição para Pedido

Código	Descrição
111.001	Dispositivo de Anestesia Adulto
111.002	Dispositivo de Anestesia Infantil

Características do Produto

DISPOSITIVO DE ANESTESIA ADULTO

Balão:

- Confeccionado em borracha, de alta durabilidade,
- Capacidade de 5 litros ou 3 litros.

Conector 22M x 22F com entrada lateral:

- Confeccionado em alumínio
- Conectores cônicos de 22 mm macho x 22 mm fêmea.
- Bico lateral para conexão de tubo 6 x 10, para entrada de gases.
- Tampa de oclusão do bico lateral.



Válvula Unidirecional:

- Confeccionada em policarbonato transparente e inquebrável.
- Com sistema de válvula de segurança calibrado em 75 cm/H2O.
- Garantia do volume insuflado.

Tampa de Oclusão:

- Confeccionada em borracha nitrílica.

Máscara Adulto:

- Bojo em policarbonato transparente, atóxico e inquebrável.
- Coxim em polivinil atóxico, de alta durabilidade na cor verde.

DISPOSITIVO DE ANESTESIA INFANTIL

Balão:

- Confeccionado em borracha, de alta durabilidade.
- Capacidade de 0,5, 1 ou 2 litros.

Conector 15M x 15F com entrada lateral:

- Confeccionado em alumínio
- Conectores cônicos de 15 mm macho x 15 mm fêmea.
- Bico lateral para conexão de tubo 6 x 10, para entrada de gases.
- Tampas de oclusão dos bicos laterais (são utilizadas duas unidades por conjunto).

Traquéia Corrugada 15 x 200 mm:

- Confeccionada em Silicone.

Conector Cotovelo 15M x 22F:

- Confeccionado em alumínio.
- Conectores cônicos de 15 mm macho e 22 mm fêmea.

Tampa de Oclusão:

- Confeccionada em borracha nitrílica.

Máscara Infantil:

- Bojo em policarbonato transparente, atóxico e inquebrável.
- Coxins em polivinil atóxico, de alta durabilidade na cor verde.

Especificações Técnicas

DISPOSITIVO DE ANESTESIA ADULTO

Capacidade do balão: 5 litros ou 3 litros

Tamanho da máscara (mm): 100 x 130 x 90

Calibragem da válvula de segurança: 75 cm/H2O

Dimensões básicas (mm): 160 x 470 x 90



Peso (kg): 0,335

DISPOSITIVO DE ANESTESIA INFANTIL

Capacidade do balão: 1 litro

Tamanho da máscara (mm): 80 x 110 x 70

Dimensões básicas (mm): 90 x 650 x 70

Peso (kg): 0,235

Precauções

- Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza do seu Dispositivo de Anestesia.
- Não tente manusear o Dispositivo de anestesia sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não fume no local onde está sendo utilizado o seu Dispositivo de Anestesia.
- Conserve o seu Dispositivo de Anestesia em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha o seu Dispositivo de Anestesia à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação dos itens de borracha.
- Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.
- No ato da esterilização, lembre-se que os componentes de borracha e polivinil do seu Dispositivo de Anestesia, não suportam temperaturas superiores a 60°C. Para tanto recomendamos que sempre que se torne necessário um processo de esterilização, utilize-se de esterilização em ETO.
- Verifique sempre as condições de seu Dispositivo de Anestesia; eventuais vazamentos, mau funcionamento da válvula de segurança, furos nos componentes de borracha e polivinil. Caso seja constatada qualquer anormalidade contacte imediatamente a J.G. Moriya.
- Não utilize o Dispositivo de Anestesia Adulto sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu manuseio.
- Não tente fazer qualquer reparo no Dispositivo de anestesia. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada pela J.G. Moriya.
- A não observância destas condições será considerada mau uso do equipamento.

Instruções de Uso

A perfeita utilização deste equipamento depende do conhecimento dos corretos procedimentos de anestesia.

O Dispositivo de Anestesia é utilizado para ventilação espontânea e controlada



manualmente, e é um sistema de anestesia sem reinalação.

Comumente é utilizado com o auxílio de um Rotâmetro ou Fluxômetro e um Vaporizador que irá liberar o halogenado (anestésico), e propiciar o processo de anestesia geral.

Itens e Peças

DISPOSITIVO DE ANESTESIA ADULTO

Código 715.023 - Balão de 5litros - uma unidade

Código 101.170P - Válvula Unidirecional Adulto - uma unidade

Código 152.203 - Conector 22M x 22F com entrada lateral - uma unidade

Código 715.190P - Máscara de Anestesia Adulto - uma unidade

Código 152.202 - Tampa de Oclusão - uma unidade

DISPOSITIVO DE ANESTESIA INFANTIL

Código 715.020 - Balão de 1 litro - uma unidade

Código 715.249 - Traquéia 15 x 200 mm - uma unidade

Código 152.200 - Conector 15M x 15F com entrada lateral - duas unidades

Código 152.201 - Cotovelo 15 x 22 mm - uma unidade

Código 152.202 - Tampa de Oclusão - duas unidades

Código 715.166 - Máscara de Anestesia Infantil - uma unidade

Embalagem e Armazenamento

O Dispositivo de anestesia é embalado individualmente em embalagem plástica e selado à quente. Dentro de cada embalagem estão inseridos todos os itens descritos na seção "Itens e Peças" para cada tipo de conjunto de anestesia.

Na parte externa da embalagem, estará fixada uma etiqueta com o código de barras. Dentro do código de barras estão inseridas todas as informações do produto final, desde o seu código de comercialização até os lotes de peças aplicadas, e datas de entrega, para a sua confecção.

O produto deverá ser armazenado e utilizado preferencialmente dentro das temperaturas ambiente. Não devendo exceder a variação de 0 à 30°C.

Esta limitação de temperatura deve-se a utilização de componentes de borracha, que tem o seu desempenho prejudicado (bem como as características técnicas) em temperaturas extremas.

NOTA: Se por ventura o equipamento ficou armazenado em temperaturas próximas às limites descritas acima, aconselhamos que o mesmo seja colocado no local de utilização com antecedência para chegar a temperatura ambiente; sob pena de danos ao equipamento e/ou no seu desempenho.



Garantia

A J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegurará ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnico autorizado pela J.G.Moriya, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra.

A J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota conter rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho (ida e volta).

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO MÉDICO-HOSPITALAR.

Para poder usufruir com segurança da garantia do seu Dispositivo de Anestesia é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail (jgmoriya@jgmoriya.com.br) ou correio.

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

C.N.P.J. 67.882.621/0001-17

Rua Colorado, 291 – Vila Carioca – Ipiranga – São Paulo – SP

CEP 04225-050

Telefones: (11) 2914.9716 – Fax: (11) 2914.1943

Registro ANVISA nº: 10349590082

Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya

CREA 0600289359/D



FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Nome Completo/Razão Social: _____

Endereço Completo: _____

CEP/Cidade/Estado: _____

Telefones para Contato: _____

Fax: _____

E-mail: _____

R.G./Inscrição Estadual: _____

C.P.F./C.N.P.J.: _____

Qual produto foi adquirido: _____

De qual empresa adquiriu o produto: _____

Qual número de série ou representação numérica do código de barras: _____

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal: _____
