

ResMed

AirFit™ N10
Mascarilla nasal

Guia de ajuste da AirFit N10



- Confira se o lado cinza do arnês, que inclui os logotipos ResMed e AirFit N10, está voltado para fora.
- Desconecte as correias inferiores. Alinhe a base da almofada com a base do nariz.



- Coloque a almofada sobre o nariz.
- Segure a máscara contra o rosto.
- Passe o arnês por cima da cabeça.



- Passe as correias inferiores por baixo das orelhas e fixe as presilhas EasyClick na parte externa da estrutura.



- Solte os encaixes de fixação superiores.
- Ajuste as correias uniformemente, até que a máscara esteja encaixada confortavelmente logo abaixo do nariz, depois recolque os encaixes de fixação, para que se alinhem com as correias superiores.

DICA: As correias superiores são os ajustes principais para selagem e conforto. Certifique-se de que não estejam apertadas demais.



- Solte os encaixes de fixação das correias inferiores. Ajuste as duas correias uniformemente, até que a máscara esteja estável, e recolque os encaixes de fixação.
- Conecte o tubo da máscara no tubo de ar conectado ao dispositivo.

DICA: As correias inferiores só precisam de tensão mínima para que a máscara esteja confortável.



- Ligue o dispositivo, para que sopre ar.
- Ajuste a almofada e o arnês, até que a máscara esteja confortável no nariz, e não dobrada ou torcida.
- A máscara agora está pronta para uso.

Nota: Para instruções completas, consulte o Manual do Usuário.



Opções adicionais

- O paciente pode posicionar a parte inferior do arnês por cima ou por baixo dos cabelos, de acordo com sua preferência.
- Envolvimentos macios opcionais podem ser montados para mais conforto nas bochechas.



ResMed

AirFit™ N10

Mascarilla nasal



Desempenho sem esforço

A máscara nasal compacta AirFit™ N10 da ResMed é parte da nova linha AirFit da ResMed — o ajuste perfeito para você. Seu desempenho excelente, combinado com a usabilidade otimizada, eleva o padrão na categoria nasal compacta. A AirFit N10 é simples e intuitiva para ajuste pelos pacientes, e confortável de usar, com uma estrutura sob os olhos que fornece uma linha de visão livre.

Simplicidade

Presilhas EasyClick com alinhamento automático fixam a estrutura ao arnês facilmente. Além disso, inclui uma almofada de presilha simples e um tubo curto integrado durável, mas altamente flexível.

Conforto

A almofada macia, o arnês SoftEdge™ e os envoltórios macios opcionais contribuem para a satisfação do paciente. E a ventilação silenciosa ajuda a criar um ambiente confortável.

Liberdade visual

Com design compacto e estrutura elegante posicionada sob os olhos, a AirFit N10 fornece aos pacientes visão sem restrições.

Em tudo, a primeira escolha¹

A AirFit N10 foi projetada para fornecer o desempenho confiável que os pacientes experimentam com as máscaras ResMed, com usabilidade e conforto otimizados. Como é mostrado em dois estudos da ResMed, os pacientes classificaram a AirFit N10 como sua primeira escolha em geral, em comparação com máscaras nasais líderes no setor. Eleita a Nº 1 por facilidade de uso, estabilidade, conforto e discricção, você pode ter confiança de que a AirFit N10 é a máscara certa para os seus negócios.



Recursos e benefícios da AirFit N10

O design do amês SoftEdge™ tem

um tecido de alta qualidade e bordas arredondadas que é confortável de usar e reduz o risco de marcas no rosto.



A almofada de presilha

é rápida e fácil de remover e reconectar.

A ventilação difusa circular

direciona o ar para longe, para não perturbar o usuário e seu cônjuge.

O tubo flexível leve e durável

é integrado à estrutura. Foi projetado para alongar-se e dobrar-se perfeitamente a 360° para ajuste à movimentação do paciente durante o sono, sem comprometer a selagem da máscara.

A almofada Spring Air™ com parede dupla modificada fornece uma selagem confortável de alto desempenho.

A presilha da almofada é rápida e fácil de remover e reconectar.

As presilhas EasyClick oferecem autoalinhamento com clique audível, para ajuste rápido e seguro.

Envoltórios macios opcionais aumentam o conforto nas bochechas.



¹ Em comparação com máscaras nasais líderes no setor. Estudos internos da ResMed: D632-105 de agosto de 2013 e D632-124 de novembro de 2013.


Componentes da AirFit N10

O sistema de armação inclui estrutura, almofada, envoltórios macios e presilhas do arnês.

63231 (Pequena)
63230 (Padrão)
63232 (Larga)

Almofada

Armação

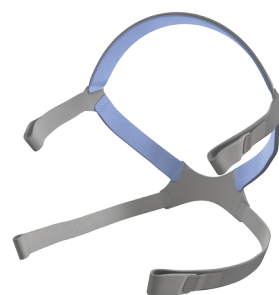

O arnês da AirFit N10
63262 (Pequeno)
63260 (Padrão)



Arnês AirFit N10 para Ela
63261 (Pequeno)

Almofada

63241 (Pequena)
63240 (Padrão)
63242 (Larga)

Número mínimo de peças

torna a máscara nasal compacta AirFit N10 fácil de ajustar, usar e limpar.

Códigos dos produtos

Sistema de máscara AirFit N10 para Ela Pequeno	63201
Sistema de máscara AirFit N10 Padrão	63200
Sistema de máscara AirFit N10 Larga	63202

Nota: Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário.

* Respostas combinadas de pacientes que expressaram uma preferência em uma pesquisa independente em EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Austrália em setembro de 2012. Visite www.resmed.com/maskbrand.

