



AcuCare™ HFNC
High flow nasal cannula



Velocidade, estabilidade e sucesso em OAF

O AcuCare HFNC tem ajuste rápido e intuitivo e foi projetado para ficar no lugar uma vez instalado, proporcionando velocidade e estabilidade para sucesso integrado em oxigenoterapia de alto fluxo (OAF).

Ajusta-se em segundos

Usando tecnologias premium inovadoras de interface de pacientes da ResMed, o AcuCare HFNC foi criado para permitir que os médicos o apliquem em pacientes em segundos. O arnês com uma tira elástica dupla permite que você separe as tiras para afrouxá-las ou aproxime-as para apertá-las. Simples assim.

Projetado para ficar no lugar

A combinação inovadora de arnês e estrutura ligados do AcuCare HFNC foi desenhada para ficar no lugar quando aplicada. Ela permite que você rapidamente estabilize seu paciente para poder gastar mais tempo com cuidados quando for mais necessário. Simplesmente aplique-a e confie nela.


Sucesso integrado

Ao escolher uma máscara ResMed, você está escolhendo uma tecnologia criada com base em mais de 25 anos de experiência em soluções não invasivas. Você pode confiar na qualidade da terapia que está proporcionando a seus pacientes.


[ResMed.com/AcuCare](https://www.ResMed.com/AcuCare)

Principais recursos

- O inovador arnês com tira dupla se ajusta confortavelmente à coroa da cabeça.
- A estrutura estabiliza a cânula no rosto e se ajusta a uma grande variedade de perfis faciais.
- Nesta plataforma estável, as prongas proporcionam um ajuste que contorna as narinas, garantindo conforto ao paciente mesmo em altas taxas de fluxo.

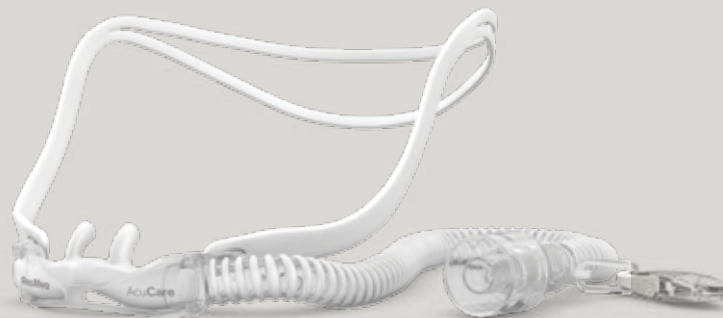

Guia de tamanho e ajuste para o AcuCare HFNC

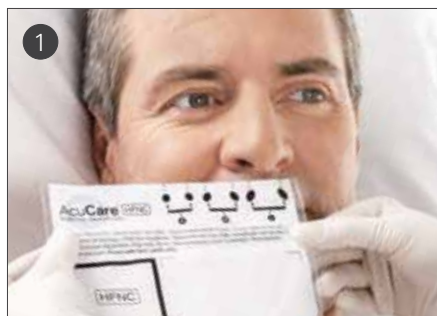

- Use o modelo de tamanhos da embalagem para determinar o tamanho correto de cânula para seu paciente.
- Inspeção a cânula nasal antes de usá-la e substitua-a se alguma peça estiver danificada.



- Segure as prongas afastadas do nariz.
- Segure a tira inferior e posicione-a na parte de trás da cabeça.



- Posicione a tira superior na parte superior da cabeça.
- Verifique se as prongas estão nas narinas, mas não as estão fechando.
- Mova as tiras em direções opostas para afrouxá-las e na mesma direção para apertá-las.



- Prenda o clipe do final do tubo curto à roupa do paciente.



- Conecte a cânula ao tubo do sistema de umidificação aquecida.

Códigos dos produtos

AcuCare HFNC: Pequeno (20/emb.)	23003
AcuCare HFNC: Médio (20/emb.)	23004
AcuCare HFNC: Grande (20/emb.)	23005