



INSTRUÇÕES DE USO

FAMÍLIA DE CÂNULAS NASAIS Série 1600 (Adulta) / Série 1601 (Infantil) / Série 1611 (Neonatal) Salter Labs

Distribuidor:

J.G Moriya Repres. Imp. e Exp. Comercial Ltda.

Autor. Func.: 800.790-0

Rua: Colorado, 291 Vila Heliópolis

São Paulo – SP Brasil

CEP: 04150-000

Tel.: (0XX11) 5573-3610

Fax: (0XX11) 5535-5080

Fabricante:

Salter Labs

100 W. Sycamore Rd.

Arvin, CA 93203

Tel: (661) 854-3166

Fax: (661) 854-3850

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya CREA-SP:28935

Registro ANVISA nº: WWWWWWWWWW

PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO ESTÉRIL


Descrição do produto

As cânulas nasais fornecem conforto aos pacientes. A cânula fornece para o paciente um dispositivo de desgaste bem e fornece níveis precisos de oxigênio como prescritos pelo médico.

As Cânulas Salter Labs com seu ajuste anatômico original, trabalha com o anatomia facial ao contrário de trabalhar de encontro à anatomia como outras cânulas. Conseqüentemente, a cânula fornece um conforto maior e conduz para melhorar o tratamento do paciente.

O design único ajuda a reduzir a irritabilidade de pele comparado aos outros oferecidos no mercado.

A linha das cânulas nasais a qual usa nossa tubulação, que não tem virtualmente nenhuma memória, realça o tratamento do paciente, porque não está tentando continuamente desenrolar ou desembaraçar a tubulação.

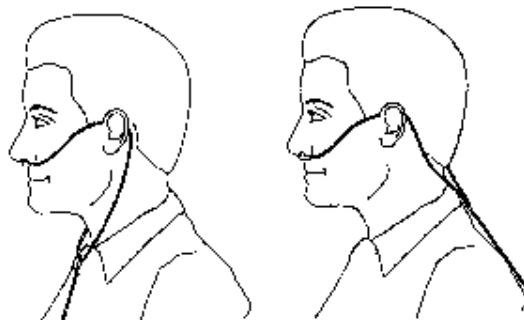

Especificações Técnicas

	Série 1600 (Adulta)	Série 1601 (Infantil)	Série 161 (Neonatal)
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> - Anatomicamente curvada para caber a borda superior - Curvados, Afilados - Sobre o estilo da orelha - Tubulação de segurança de três canaletas - Macio, material desobstruído, peso leve - SEM LÁTEX 	<ul style="list-style-type: none"> - Anatomicamente curvada para caber a borda superior - Curvados, Afilados - Sobre o estilo da orelha - Tubulação de segurança de três canaletas - Macio, material desobstruído, peso leve - SEM LÁTEX 	<ul style="list-style-type: none"> - Anatomicamente curvada para caber a borda superior - Curvados, Afilados - Sobre o estilo da orelha - Tubulação de segurança de três canaletas - Macio, material desobstruído, peso leve - SEM LÁTEX
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> - Elimina a aleta ou o cume que podem causar irritação - melhor ajuste anatômico - Posicionamento seguro, garantindo movimento livre. - Fluxo ininterrupto de oxigênio - Maior conforto para um uso de longa duração - Não interfere na observação do paciente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elimina a aleta ou o cume que podem causar irritação - melhor ajuste anatômico - Posicionamento seguro, garantindo movimento livre. - Fluxo ininterrupto de oxigênio - Maior conforto para um uso de longa duração - Não interfere na observação do paciente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elimina a aleta ou o cume que podem causar irritação - melhor ajuste anatômico - Posicionamento seguro, garantindo movimento livre. - Fluxo ininterrupto de oxigênio - Maior conforto para um uso de longa duração - Não interfere na observação do paciente.
Características	Fornecido com tubulação de segurança com três canaletas em tamanhos variados de 4 a 100 pés.	Fornecido com tubulação de segurança com três canaletas.	Fornecido com tubulação de segurança com três canaletas.
Performance Padrão	Capacidade de fornecimento do fluxo de oxigênio para o paciente variando de 0 a 8 litros/minuto.	Capacidade de fornecimento do fluxo de oxigênio para o paciente variando de 0 a 3 litros/minuto.	Capacidade de fornecimento do fluxo de oxigênio para o paciente variando de 0 a 3 litros/minuto.
Matéria Prima	Parte da Face (Polivinilclorido)/Tubo 19" (Polivinilclorido)/Bolo (polietileno de baixa densidade)/Conector "Y" (Polivinilclorido)/Tubo – 3 canais (Polivinilclorido)/Conector, parte final (Polivinilclorido)	Parte da Face (Polivinilclorido)/Tubo 19" (Polivinilclorido)/Bolo (polietileno de baixa densidade)/Conector "Y" (Polivinilclorido)/Tubo – 3 canais (Polivinilclorido)/Conector, parte final (Polivinilclorido)	Parte da Face (Polivinilclorido)/Tubo 8" (Polivinilclorido)/Bolo (polietileno de baixa densidade)/Conector "Y" (Polivinilclorido)/Tubo – 3 canais (Polivinilclorido)/Conector, parte final (Polivinilclorido)

Formas de Apresentação

- **Série 1600**

Tamanhos Especiais	Embalagem (unidades por caixa)
Cânula Adulta com um tubo 1'	50
Cânula Adulta com um tubo 4'	50
Cânula Adulta com um tubo 9'	50
Cânula Adulta com um tubo 10'	50
Cânula Adulta com um tubo 12'	50
Cânula Adulta com um tubo 13'	50
Cânula Adulta com um tubo 14'	50
Cânula Adulta com um tubo 15'	50
Cânula Adulta com um tubo 16'	50
Cânula Adulta com um tubo 20'	25
Cânula Adulta com um tubo 21'	25
Cânula Adulta com um tubo 24'	25
Cânula Adulta com um tubo 25'	25
Cânula Adulta com um tubo 30'	20
Cânula Adulta com um tubo 35'	20
Cânula Adulta com um tubo 40'	20
Cânula Adulta com um tubo 50'	20
Cânula Adulta com um tubo 75'	15
Cânula Adulta com um tubo 100'	10

- **Série 1601**

Tamanhos Especiais	Embalagem (unidades por caixa)
Cânula Infantil desobstruída com um tubo 7'	50

- **Série 1611**

Tamanhos Especiais	Embalagem (unidades por caixa)
Cânula Neonatal desobstruída com um tubo 7'	50

Informações Gráficas

Série 1600






Série 1601



Série 1611

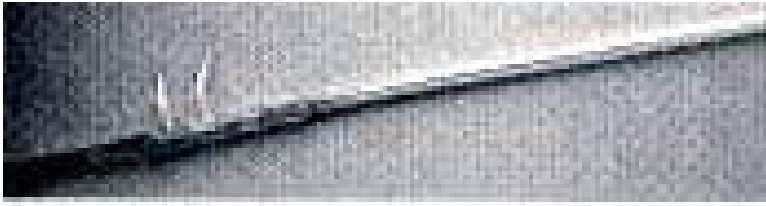

Série 1601 e 1611





Indicações

- Administração de Oxigenoterapia

Contra Indicações

- Hipersensibilidade do paciente ao PVC ou ao Polietileno.

Precauções

- Produto Não Estéril.
- Produto de uso único.
- Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio.
- O descarte deste produto deve ser realizado com os procedimentos utilizados para resíduo sólido potencialmente infectante, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica. Cada instituição apresenta um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de seus resíduos sólidos, seguindo as normas estabelecidas.

Transporte e Armazenagem

- Temperatura de armazenamento 0 a 50⁰C.
- Não pise na embalagem.
- Não permita quedas sobre superfícies rígidas.
- Armazene o produto em local limpo, seco e protegido da luz direta do sol e vapores químicos.

Informações Gerais

- **Especificações Internacionais e Normas Técnicas seguidas para garantir a qualidade do produto:**

A empresa Salter Labs encontra-se com seus procedimentos de acordo com as Boas Práticas da Fabricação (GMP) e certificados com os padrões da norma ISO 9001/EN 46001, devidamente conferidos por órgãos da garantia da qualidade, a prova disto é a aprovação pelo FDA (vide o Certificado de Livre Comércio).

Instruções de uso

- Una o conector da extremidade à fonte de oxigênio e ajuste o fluxo prescrito do litro, para não exceder 3 LPM.



- Verifique o fluxo prendendo os direcionadores de fluxo nasais perto da sua orelha e aguarde até ouvir um barulho silvando. Aumente o fluxo temporariamente se necessário e reduza então para o fluxo prescrito.
- Posicione a cânula sobre a face do paciente inserindo os direcionadores de fluxo nasais nas narinas.
- Passe a tubulação das cânulas pelas orelhas e atrás da cabeça (a cabeça não deve descansar em qualquer parte da cânula quando o paciente estiver para baixo)
- Deslize a luva sobre a cabeça para assegurar um bom ajuste.
- Se necessário, fixe a tubulação da cânula à face do paciente com uma única parte de fita adesiva em cada mordente.
- Certifique-se, periodicamente, de que a tubulação não esteja torcida e se os direcionadores de fluxo nasais estão corretamente inseridos nas narinas.
- Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio.
- Produto Não Estéril.
- Produto de Uso único

NOTA: Os direcionadores de fluxo nasais podem ser aparados a um comprimento mais curto, se for necessário.

PRECAUÇÃO: A intenção de uso desta cânula é para fornecer oxigênio suplementar ao paciente. Deve-se tomar cuidado para evitar a pressão positiva constante (CPAP).



TERMO DE GARANTIA LEGAL

(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990)

A empresa **JG Moriya Repres. Imp. e Exp. Comercial Ltda.**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3o do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do material em questão.
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados descritos.

Responsável Técnico: **Juan Goro Moriya Moriya** **CREA-SP:28935**

Responsável Legal: **Juan Goro Moriya Moriya**