



## INSTRUÇÃO DE USO:

### FRASCO COLETOR COM TAMPA (Frascos Coletores)



### TABELA COMPARATIVA

<b>Modelo</b>	<b>Diâmetro</b>	<b>Comprimento</b>
Frasco de ½L	85mm	162,5mm
Frasco de 1L	108mm	189mm
Frasco de 3L	161,5mm	200mm
Frasco de 5L	163mm	303mm



**Acessório uso exclusivo:**  
Frasco Coletor com Tampa e Rodízio

**Formas de apresentação:**

O Frasco Coletor com Tampa é embalado individualmente em caixa de cartolina com identificação do equipamento e fabricante. Dentro de cada embalagem estão inseridas todas as partes do Frasco Coletor com Tampa. O Frasco Coletor pode ser comercializado com ou sem graduação.

**Indicação:**

O Frasco Coletor com Tampa tem por finalidade armazenar/coletar secreções/fluidos de pacientes.

**Princípio de funcionamento:**

O Frasco Coletor com Tampa deve ser conectado à mangueira ligada ao aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e do outro lado à mangueira conectada ao paciente.

**Modo de uso:**

Conecte a extremidade uma mangueira de PVC ou silicone (opcionais) ao aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e a outra extremidade à entrada do Frasco Coletor com Tampa. Conecte a saída do Frasco Coletor com Tampa a outra mangueira que será utilizada para aspirar as secreções/fluidos do paciente. Após conectar todas as mangueiras ao frasco coletor, o aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico pode ser acionado.

**Composição:**

Frasco coletor de vidro

Bóia de segurança de polipropileno

Tampa de borracha

Conectores de latão cromado

**Dimensões:**

<b>Modelo</b>	<b>Diâmetro</b>	<b>Comprimento</b>
Frasco de ½L	85mm	162,5mm
Frasco de 1L	108mm	189mm
Frasco de 3L	161,5mm	200mm
Frasco de 5L	163mm	303mm

**Método de esterilização:**

Não aplicável.

**Prazo de validade:**

Indeterminado

**Condições de armazenamento:**

Manter em local seco e temperatura ambiente de 15° a 30°C e umidade relativa de 61 a 90%

**Transporte:**

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.

**Manipulação:**

Não use o Frasco Coletor com Tampa sem conhecimento prévio ou supervisão adequada.

O Frasco Coletor com Tampa só poderá ser utilizado quando acoplado a um aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico.

**Advertência:**

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste produto, consulte a J.G.Moriya mais próxima para maiores esclarecimentos. Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

**Precauções:**

Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza da sua extensão.

Não fume no local onde está sendo utilizada a extensão.

Conserve a sua extensão em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à luz do sol.

Não exponha o produto à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação dela.

Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.



Verifique sempre as condições do produto. Caso seja constatada qualquer anormalidade contate imediatamente a J.G. Moriya.

Não utilize o produto sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu manuseio.

Não tente fazer qualquer reparo no produto. A manutenção deste produto só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.

Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não indicada pela J.G. Moriya.

A não observância destas condições será considerada mau uso do produto.

**Fabricante, Distribuidor e Assistência Técnica:**

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04225-050

Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943

CNPJ: 67.882.621/0001-17

Autorização/MS - 1.03.495-9

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya

Autarquia profissional: CREA n.º 060028.9359/D

e-mail: [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

site: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)

Cadastro ANVISA nº:

**“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”**

---

Juan Goro Moriya Moriya  
Representante Legal

---

Juan Goro Moriya Moriya  
Responsável Técnico  
CREA-SP nº 060028.9359/D